



Core-Tool Anleitung


Tool zum entfernen
des Retentionseinsatzes

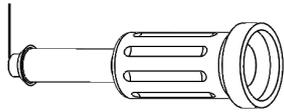

Einsetztool für
Retentionseinsatz


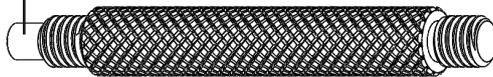


Maximus
Eindrehtool

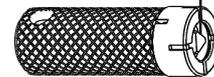


RETENTIONSEINSATZ IN TITANKAPPE POSITIONIEREN

Spitze entfernen

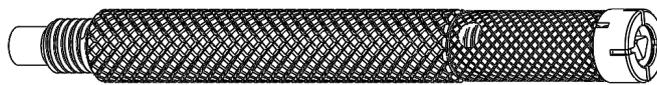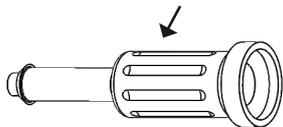

Einsatz in Kappe drücken

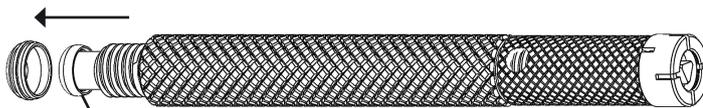


Titan-Kappe


Retentionseinsatz

RETENTIONSEINSATZ AUS KAPPE ENTFERNEN


Spitze rausdrehen

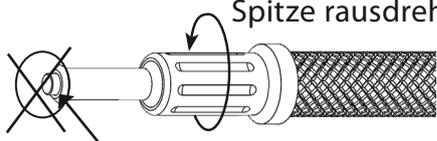

Darauf achten, dass innerer Stempel
nicht rauschaut!

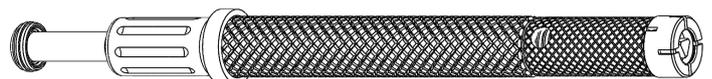

Retentionseinsatz durch kippen
des Instruments entfernen

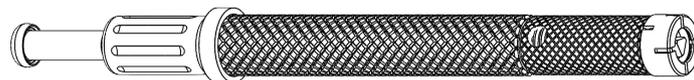

Die Drehbewegung drückt den Retentionseinsatz vom Instrument

